


Köszönjük a vásárlást!

A terméket hamarosan tovább fejlesztjük egy szélesebb állítási tartomány elérése érdekében. Mivel a lábak cserélhetőek, ezért az új típusú lábak alkalmasak lesznek a most megvásárolt székekre. Információk a [www.jabuga.com](http://www.jabuga.com) / mozgássérült gyerekek oldalán lesznek elérhetőek.

### Furat pozíciók az oldalon és lábon

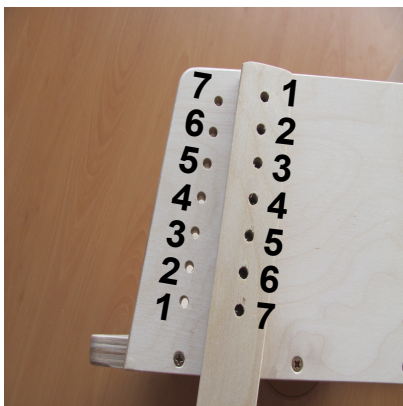

### Furat pozíciók az ülőlap és a karfa magassága (cm)

#### 40 cm-es lábbal

furat	ülőlap	karfa
1-7	24	40
1-6	26	42
1-5	28	44
1-4	30	46
1-3	32	48



### Összeszerelés

Fordítsa a széket az oldalára, majd tegye a kapupánt csavart a furatba, úgy, hogy a csavar szára kifelé (a külső oldal) felé áll. Üsse be teljesen a csavart, hogy annak pereme felfeküdjön a belső oldalra. Helyezzen egy-egy alátétet a csavarszárakra. Helyezze fel a lábat, majd tegyen egy alátétet és egy anyacsavart a menetre. Húzza meg kézzel az anyát. Ismételje meg a műveletet a másik oldal lábaival, majd állítsa talpra a széket. Mozgassa meg, hogy beálljon a szék és ne billegjen, majd ezután szerszámmal húzza szorosra a menetet.

Cégek figyelmébe:

A termék magyar kisipari szellemi tulajdon. Kérem amennyiben másolni szeretne, akkor erre inkább válasszon külföldi, a hazai piacon ismeretlen tartalmakat.



Összeszerelési útmutató állítható lábú kisszékhez

[www.jabuga.hu](http://www.jabuga.hu)